

# EMS FACE TIME

StimaWELL® FaceTime





StimaWELL® FaceTime

# INHALT

StimaWELL® FaceTime .....	4
Wissenschaftlicher Hintergrund...	6
Die Anwendung .....	11
Anwender-Stimmen.....	12
StimaWELL® Nutrition.....	14
StimaWELL® EMS Programme für Ihr Wohlbefinden.....	18

# STIMAWELL® FaceTime

StimaWELL® FaceTime ist ein einzigartiges Konzept zur Ermöglichung der Straffung der Gesichtsmuskulatur und Reaktivierung der Gesichtspartie. StimaWELL® FaceTime kombiniert die Effekte aus Muskeltraining mittels EMS, der Mesotherapie, der Iontophorese, der Hyaluronbehandlung und des Mikro-Needlings. Mittels einer speziellen Elektrodenmaske wird ein per-

fekt auf die Gesichtsanwendung abgestimmter Strom passgenau an die Gesichtspartien abgegeben. Dazu wird die Haut kurz mittels eines Mikronadelrollers vorbereitet, das Gesicht dann mit negativ aufgeladenem Hyaluronserum vorbehandelt und schließlich die Wirkungen von Iontophorese und EMS konzentriert zum Einsatz gebracht.

## StimaWELL® FaceTime



Spannungskopfschmerz

Stirnfalten

Zornesfalte

Krähenfüße

Spannkraft

Nasolabialfalte

Senkrechte Oberlippenfalten

Marionettenfalte

Gesichtskontur

**StimaWELL® FaceTime**

Informieren Sie sich:

[www.stimawell-ems.de/shop/beauty](http://www.stimawell-ems.de/shop/beauty)

# WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND

## 1. EMS

Elektrische Impulse sind im menschlichen Körper allgegenwärtig. In unserem Nervensystem fließen permanent geringe Ströme und vermitteln so Informationen. Sie sind beteiligt an der Wahrnehmung aller Außenreize wie Wärme und Berührung, aber auch an der Schmerzleitung und der Bewegungssteuerung des Körpers. An allem, was wir spüren oder tun, sind also elektrische Impulse im Gehirn und dem Nervensystem beteiligt.

Dieses Prinzip macht sich die Elektrostimulation zunutze. Das Elektrostimulationsgerät sendet kurze elektrische Impulse, die über Elektroden durch die Haut zu den darunterliegenden Nerven fließen. Dort haben sie je nach Art der Impulse unterschiedliche Wirkungen, die von Muskeltraining bis hin zu Schmerzlinderung reichen. Wegen dieser Effekte wird die Elektrostimulation unter anderem in der Schmerztherapie, der Sportmedizin, Physiotherapie und Rehabilitation eingesetzt. Sie ist wissenschaftlich anerkannt und hat neben ihrem Einsatz in der Medizin auch im Sport eine wachsende Anhängerenschaft. Beim EMS-Training aktivieren elektrische Impulse von außen die Muskulatur. Dem Muskel ist es gleichgültig, ob elektrische Reize vom Gehirn oder von Elektroden ausgesendet werden. Er reagiert mit Kontraktion. Hier sind je nach Stromtyp fast 100 % Muskelaktivierung möglich und das bei allen Hauptmuskelgruppen. Das macht EMS-Training so effektiv. Seit etwa 50 Jahren wird EMS in der Therapie eingesetzt. Dort werden Klebeelektroden lokal an Muskeln

angesetzt, um diese schneller und effektiver wiederaufzubauen und dabei die Gelenke zu schonen oder auch Schmerzen zu lindern. Eine Anwendung im Gesicht war jedoch in der Vergangenheit durch die Schwierigkeit, Strom mittels Selbstklebeelektroden zu nutzen, limitiert.

Nunmehr ist es möglich, mittels einer speziellen mit Silber beschichteten Elektrodenmaske diese Ströme auch großflächig im Gesicht zu applizieren. Die Gesichtsmuskulatur wird kontrahiert und damit ein nachhaltiger Trainingseffekt erzielt. Die verstärkte Muskelaktivität regt die Durchblutung an und lässt die nunmehr reaktivierten Areale frischer erstrahlen. Das mit dem Training der Muskelfasern verbundene Muskelwachstum stärkt erschlaffte Areale und sorgt für die Revitalisierung des gesamten Gesichtsbereichs.



## 2. MESOTHERAPIE

Mesotherapie ist eine komplementärmedizinische Behandlungsmethode, die um 1960 von dem französischen Landarzt Michel Pistor entwickelt wurde. Sie enthält Elemente aus der Akupunktur, aus der Neuraltherapie und kennt Reflexzonen. In die mittlere (meso) Hautschicht werden Injektionen mit homöopathischen sowie niedrigdosierten herkömmlichen Medikamenten eingebracht (Injektionsakupunktur). Die jeweiligen Mischungen sind von Arzt zu Arzt verschieden, sie enthalten oft Vitamine und Spurenelemente.

Die Methode soll bei zahllosen Erkrankungen, selbst bei unheilbaren Problemfällen helfen.

Zu den Indikationen gehören u.a. Cellulite, veno-lymphatische Insuffizienz, Phlebitis, Prävention und Folgen der Hautalterung (Mesolift), Wundheilungsstörungen, Ulzera, Acne vulgaris, Narben und Striae, lokale Herde von Neurodermitis und Psoriasis und androgener und diffuser Haarausfall sowie leichte Fälle von Alopecia areata.

Des Weiteren genannt werden als Anwendungsgebiete: Durchblutungsprobleme, Keloide, rheumatische Erkrankungen, Arthrosen, Überlastungsschäden, Abwehrschwäche, Asthma, Erschöpfungszustände, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Alterssichtigkeit und Altersschwerhörigkeit, Übergewicht, Reizblase und Infertilität.

Begründet wird die Methode mit einer deutlichen Verbesserung der Mikrozirkulation, einer Regulierung des neurovegetativen Systems und einer lokalen Immunmodulation.

Angewendet werden in erster Linie Sympatholytika, Beta-Sympathikomimetika (Hydergin, Bufetil) sowie Analgetika, Antiphlogistika, nicht-steroidale Antirheumatika und Neuroleptika somit auch Hyaluron.

Die Mesotherapie ist außer in Frankreich vorwiegend in Kanada und den USA verbreitet, insbesondere zur Fettreduktion. In Deutschland gibt es die 1984 gegründete „Deutsche Gesellschaft für Mesotherapie“, hier findet man z. B. alleine in Oberbayern - inklusive München - ca. 100 niedergelassene Ärzte und Heilpraktiker, die Mitglied dieser Gesellschaft sind. In Bordeaux, Frankreich, gibt es sogar einen offiziellen Universitätskurs für Mesotherapeuten.



**StimaWELL® FaceTime**  
**Unterstützen Sie Ihre Haut**  
**mit Sport an der frischen Luft!**

### 3. IONTOPHORESE UND MESOTHERAPIE

---

Die Mesotherapie ist mittlerweile auch in Form der sogenannten non-needle Mesotherapie verfügbar. Hierbei werden die Effekte der Mesotherapie ohne die Notwendigkeit von Injektionen zugänglich gemacht. Dies geschieht z. B. mittels der Applikation von Ultraschallwellen oder durch spezielle Stromformen wie der Iontophorese.

Die Iontophorese ist ein medizinisches Verfahren zur Resorption von Wirkstoffen durch die Haut unter Anwendung eines schwachen elektrischen Gleichstromes. Hier werden speziell aufgeladene oder gelöste Teilchen durch den elektrischen Strom in die Haut gezogen. So können sie im elektrischen Feld beschleunigt werden und somit die Haut durchqueren, um dann in das Gewebe zu gelangen. Meist liegt das Medikament dabei in Salbenform vor. Die Iontophorese wird mit Gleichstrom oder Impulsstrom (unterbrochener Gleichstrom) betrieben. Elektrisch positiv geladene Arzneistoffe (Kationen) werden unter die positive Elektrode platziert, negativ geladene Mittel (Anionen) unter die negative Elektrode. Hyaluron ist hier ein negativ aufgeladener Stoff.

Häufige Anwendungen liegen im Schmerzbereich aber auch beim übermäßigen Schwitzen (Hyperhidrose). Dabei wird das betroffene Körperteil in einem Wasserbad von einem Gleichstrom durchflossen. Das entsprechende Verfahren ist die Leitungswasseriontophorese (LWI). Die LWI wird mit Gleichstrom oder einem gepulsten Gleichstrom (im 10-kHz-Bereich) durchgeführt. Gleichfalls wird es im Bereich der Narben- oder Cellulitebehandlung eingesetzt.

### 4. HYALURON

---


Hyaluronsäure ist ein Glykosaminoglykan, das einen wichtigen Bestandteil des Bindegewebes darstellt und auch eine Rolle bei der Zellproliferation, Zellmigration spielt.

Die Hyaluronsäure besitzt die Fähigkeit, relativ zu ihrer Masse sehr große Mengen an Wasser zu binden (bis zu sechs Liter Wasser pro Gramm). Der Glaskörper des menschlichen Auges z. B. besteht zu 98 Prozent aus Wasser, das an nur zwei Prozent Hyaluronsäure gebunden ist. Wasser ist kaum komprimierbar, und diese Eigenschaft bleibt auch in hyaluronsäurehaltigem Gewebe gültig, in dem sehr viel Wasser gebun-



den werden kann. Dies gilt allgemein für große Teile des Bindegewebes. Daher rührt auch die Anwendung im Bereich der Falten und Cellulitebehandlung.

Für wandernde Zellen hält die Hyaluronsäure die „Verkehrswege“ frei. Durch Erweiterung der Zellzwischenräume (Abstände zwischen den Zellen) wird die Migration (Wanderung) der Zellen unterstützt. Neben wichtiger Strukturfunktion im Gehirn konnte zudem gezeigt werden, dass Hyaluron den Wiederaufbau von Markscheiden um Axone (Remyelinisierung) verhindern kann. Diese inhibitorische Funktion scheint vor allem bei der Multiplen Sklerose eine Rolle zu spielen.

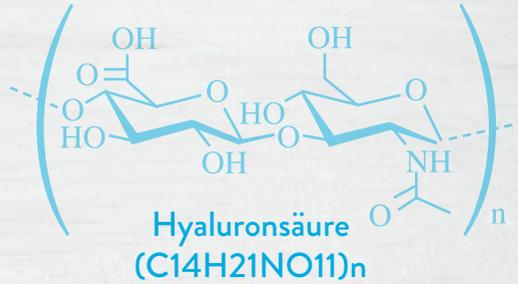

**StimaWELL® FaceTime**  
**Hochkonzentriertes Hyaluron-Serum**  
**mit samtig-weicher Textur**



## 5. MIKRO-NEEDLING

Das Mikro-Needling ist eine Behandlung der Haut mittels eines Nadelrollers, dessen 540 Nadeln eine Höhe von 0,2 mm nicht übersteigen. Hierdurch können Effekte nachhaltiger Hautverjüngung erzielt werden. Die Nadeln erzeugen mikroskopisch kleine Hautverletzungen, die sofort die körpereigenen Selbstheilungskräfte in Gang setzen. Die Folge ist die Bildung neuer Hautzellen sowie von Kollagen und Elastin.

Oftmals wird dies eingesetzt im Rahmen von Linien- und Faltenreduktion, auch bei feinen Knitterfältchen um die Augen, der Abflachung von Narben, der Minderung von Pigmentstörungen und Lichtschäden, der Verfeinerung der Porentiefe und des Wiederaufbaus von Volumen, der Verbesserung des Hautturgors und schließlich der Erhöhung der Spannkraft und Hautfestigkeit. Dieser schmerzfreien Behandlung kommt in den USA nunmehr der Status der Botox-Anwendung gleich.

**StimaWELL® FaceTime**

**Der Nadel-Roller:**

**besonders einfache Anwendung**



# DIE ANWENDUNG

StimaWELL® FaceTime ermöglicht die Kräftigung und Straffung der Gesichtsmuskulatur. Das Wirkprinzip basiert auf einer Kombination wirksamen Muskeltrainings und Muskelwachstums sowie der Einbringung des zell-anregenden und wasserbindenden Wirkstoffes Hyaluron durch Iontophorese (Transport von Partikeln in den Organismus mittels Überwindung der Zellbarriere durch elektrische Impulse).

1 Reinigen Sie Gesicht und Hände gründlich mit mildem Hautreinigungsmittel. Aus hygienischen Gründen darf der Nadelroller nur von ein und derselben Person verwendet werden.



2 Den Nadelroller nur auf gesunder, unverletzter Haut anwenden. Niemals über Augenlider oder Lippen rollen! Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf der Nadelroller-Verpackung!



3 Maske stark anfeuchten.




4 Stimulationsbandage stark anfeuchten.




5 Tragen Sie das StimaWELL® FaceTime Hyaluron-Serum mit der Pipette auf die Haut auf. Dosieren Sie zurückhaltend. Vermeiden Sie Augenkontakt! Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf der Serum-Flasche!



6 Beide Stecker an die Druckknopfadapter anschließen.

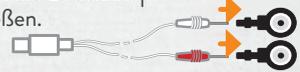

7 Den Druckknopfadapter mit dem weißen Stecker (-) an die Maske, den mit dem roten Stecker (+) an die Bandlelektrode anschließen.

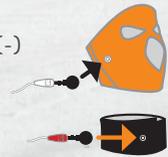

8 Maske eng auf das Gesicht setzen.



9 Stimulationsbandage an der Wade anlegen.

10 Das Kabel an Kanal 1 des TENStem eco basic anschließen. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Gerätes!



11 Wählen Sie Programm 16 aus. Vorgeschriebene/Einzuhaltende Anwendungsdauer: 20 Minuten.



12 Legen Sie mindestens 48 Stunden Pause ein, bevor Sie StimaWELL® FaceTime erneut verwenden. Verwenden Sie StimaWELL® FaceTime maximal 2 Mal pro Woche!

# ANWENDER-STIMMEN

Schon nach der ersten Anwendung von StimaWELL® FaceTime können die Kombinationseffekte seh- und spürbar sein. Der Muskeltonus erhöht sich, die gesteigerte Durchblutung lässt die Gesichtspartie leuchtend erstrahlen.

Nach dem Abflachen der erhöhten Aktivität zeigt sich eine wohltuende Entspannung der im Verlauf gestresster Tage angespannten Gesichtsmuskulatur.

” Ich fand die Anwendung sehr einfach und bin sehr zufrieden für die erste Behandlung damit. Meine Haut war zu Beginn viel größporiger und auch fettiger nun sieht sie viel ebenmäßiger und vitaler aus.



**Jana F.**



München

eMail:

11. Juni 2018

## Erste Anwendung StimaWELL® FaceTime



**VORHER**



**NACHHER**

” ... Ich bin einfach begeistert! Endlich ist nun auch eine Lösung verfügbar, die es ermöglicht gleich vier erprobte Verfahren miteinander zu kombinieren: EMS zur Straffung der Gesichtsmuskulatur, Förderung der Durchblutung der Gesichtspartien zur natürlichen Revitalisierung und effektive Hyaluron Applikation in Form von Non-Needle Mesotherapie und Mikroneedling ... “



**Heidi**  
★★★★★  
München  
eMail: \_\_\_\_\_  
23. Februar 2018



” ... Ich hätte nie gedacht, dass der Effekt so durchschlagend ist! ... “



**Brigitte O.**  
★★★★★  
Dresden  
eMail: \_\_\_\_\_  
5. Mai 2018

” ... Gleich nach der ersten Sitzung kann man merken wie alle Anspannung abfällt ... “



**Susanne W.**  
★★★★★  
Wetzlar  
eMail: \_\_\_\_\_  
21. Juli 2018

# StimaWELL® Nutrition

**UNTERSTÜTZEN SIE IHRE HAUT  
ZUSÄTZLICH ZUR ANWENDUNG DES  
STIMAWELL® FACETIME SYSTEMS  
MIT GUTEN NÄHRSTOFFEN VON  
INNEN**


Zum einen mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und zum anderen mit den Nährstoffen aus unserem StimaWELL® Nutrition-Programm.

**StimaWELL® FaceTime**

**Das A und O:**

**Eine gesunde Lebensweise**



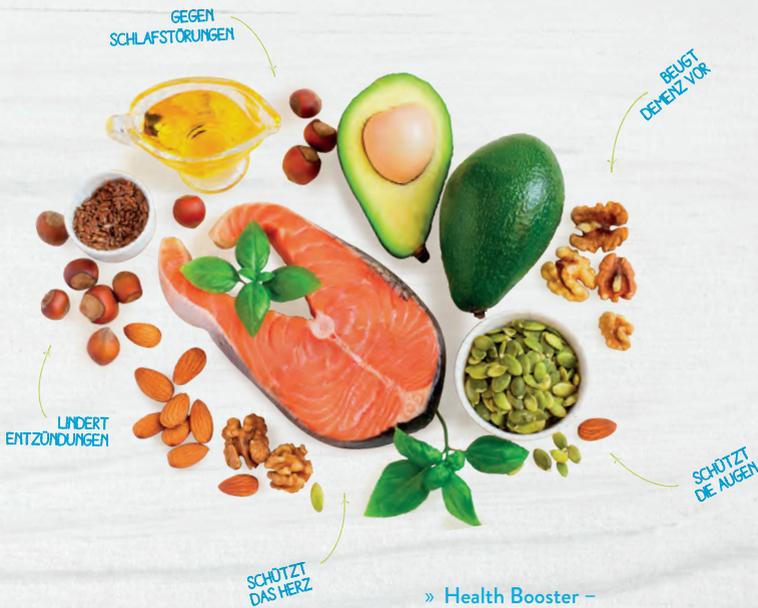

» **Cell Protector – natürliches OPC aus Traubenkernen**

Das natürliche OPC aus Traubenkernen in unserem Cell Protector unterstützt Ihre Haut und macht sie zart und geschmeidig. Kleine Fältchen vermindern sich und die Haut gewinnt ihre Spannkraft zurück. Wirken Sie Radikal-Angriffen auf Ihre Haut entgegen und verhelfen Ihrer Haut wieder zu mehr Elastizität und frischem Aussehen.



» **Health Booster – grüner Kaffee**

Bekannt ist unser Health Booster – Grüner Kaffee für seine positiven Wirkungen auf den Stoffwechsel und der enormen Unterstützung bei der Erreichung des persönlichen Wohlfühlgewichts. Die darin enthaltene Chlorogensäure zählt zu den besten Fängern von freien Radikalen, die sichtbar unsere Haut altern lassen. Begegnen Sie den negativen Umwelteinflüssen, UV-Licht und Stress mit den positiven Eigenschaften von grünem Kaffee.



» **Joint Reliever MSM – organischer Schwefel**

Ebenso profitiert Ihre Haut von der natürlichen Substanz MSM in unserem Joint Reliever. Was MSM zum Beauty-Essential macht, ist sein Booster-Effekt für Keratin und Kollagene, die beide essentielle Bestandteile ihres Bindegewebes, der Haare und Nägel sind. Stellen Sie Ihrem Körper mehr organischen Schwefel zur Verfügung und regen Sie so die Bildung von Keratin und Kollagen an. Das Ergebnis ist ein strafferes Hautbild, kräftigere Haare und feste Nägel.



» **Health Guardian – natürliche Omega-3-Fettsäuren**

Die Omega-3-Fettsäuren aus unserem Health Guardian sind wirklich beachtliche Inhaltsstoffe für Ihre Haut. Sie dienen als wesentliche Bausteine für den Aufbau der Oberflächenschichten der Haut und sorgen für einen glatteren, ebenmäßigen, jünger wirkenden und frischer aussehenden Teint – ungeachtet Ihres Alters oder Hauttyps. Es kräftigt und glättet die Hautoberfläche und beruhigt Anzeichen von gestresster Haut, wie z. B. Rötungen oder schuppiger und trocken aussehender Haut.



# StimaWELL® EMS Nutrition

Bestellen Sie unter:  
StimaWELL-EMS.de

STIMAWELL® Nutrition	Figur	Cellulite	Stoffwechsel	Energie	Muskelaufbau
<b>JOINT RELIEVER</b> (MSM 1000 – 120 Kapseln)			✓		✓
<b>CELL PROTECTOR</b> (OPC Traubenkernextrakt – 60 Kapseln)	✓		✓	✓	
<b>HEART &amp; BONE SAVER</b> (Vitamin D3 – 100 Kapseln)		✓		✓	
<b>FUNCTIONALITY SUPPORTER</b> (Multivitamin – 90 Kapseln)	✓		✓		
<b>HEALTH GUARDIAN</b> (Omega 3 Plus – 90 Kapseln)		✓	✓		
<b>POWER GAINER</b> (L-Arginin + Maca Gold – 120 Kapseln)	✓		✓	✓	✓
<b>HEALTH BOOSTER</b> (Grüner-Kaffee-Extrakt – 92 Kapseln)	✓				
<b>STRENGTH PROVIDER CHOCOLATE</b> (Whey Protein, Flohsamenschalen + Probiotikum – 630 Gramm)			✓		
<b>STRENGTH PROVIDER VANILLA</b> (Whey Protein, Flohsamenschalen + Probiotikum – 630 Gramm)		✓			
<b>MUSCLE COACH</b> (BCAA + Glutamin – 500 Gramm)		✓		✓	✓
<b>MUSCLE VITALIZER</b> (Creatin – 120 Kapseln)				✓	✓
<b>STRENGTH PROVIDER V+ VANILLA</b> (Proteinshake Vegan Vanilla – 630 Gramm)					✓
<b>STRENGTH PROVIDER V+ CHOCOLATE</b> (Proteinshake Vegan Chocolate – 630 Gramm)					✓
<b>BODY SHAPER</b> (grüner Kaffee, Guarana, Grüntee – 90 Kapseln)	✓	✓	✓	✓	✓





» **Und immer daran denken:  
Auf eine ausreichende  
Flüssigkeitszufuhr achten!**

Pro Tag sollten mindestens 1,5 bis 2 Liter ungesüßte Flüssigkeit zu sich genommen werden. Das hilft der Haut und dem gesamten Organismus.

Hier eignen sich besonders gut Wasser, grüner Tee, ungesüßte Kräutertees und leichte Schorlen.

**StimaWELL® FaceTime**

# StimaWELL® EMS PROGRAMME FÜR IHR WOHLBEFINDEN

Ihr Trainingsziel steht im Vordergrund. Wohin geht die Reise? Sollen Ihre Muskeln wachsen, soll die lästige Cellulite verschwinden, möchten Sie ein paar Kilo weniger wiegen oder Ihre Figur besser formen? Die StimaWELL® EMS Trainingsprogramme beinhalten verschiedene Sequenzen mit unterschiedlichen Impulsarten und Impulsstärken. Je nach Programm stimulieren und aktivieren diese gezielten Stromimpulse unterschiedliche Muskel- und Gewebetypen. Genauso haben Sie die Möglichkeit, die Ernährung Ihren Zielen anzupassen.

## MUSKELAUFBAU



Die frei einstellbaren „bio-elektrischen“ Impulse von StimaWELL® EMS bringen Ihren ganzen Körper in Form. Durch gleichzeitige Beanspruchung aller Muskelgruppen verbessern Sie in kürzester Zeit Ihre Leistungsfähigkeit enorm.

- » **Joint reliever (MSM 1000)**
- » **Power Gainer (L-ARGININ + MACA)**
- » **Muscle Coach (BCAA+Glutamin)**
- » **Muscle Energizer (Creatin)**
- » **Strength Enhancer Proteinshake Vegan**

## STOFFWECHSEL



Das StimaWELL® EMS Training regt auch die Durchblutung der Haut an, der Energieumsatz wird langfristig gesteigert. Positive Effekte: Gewicht und Fett werden reduziert und der Stoffwechsel wird angeregt. Bereits nach kurzer Zeit sinkt der Körperfettgehalt entscheidend.

- » **Joint reliever (MSM 1000)**
- » **Cell Protector (OPC Traubenkernextrakt)**
- » **Functionality Supporter (Multivitamin)**
- » **Health Guardian (Omega 3 Plus)**
- » **Health Booster (Grüner Kaffee Extrakt)**
- » **Bodyshaper (Grüner Kaffee, Guarana, Grüntee)**
- » **Strength Enhancer (Whey-Protein + Flohsamenschalen + Probiotikum)**

## ENERGIE



Auch für das „Aufladen“ verlorengegangener Energie kann das StimaWELL® EMS System genutzt werden. Mit sanften Massagefunktionen und leichten Stromimpulsen sorgt StimaWELL® EMS für das perfekte Relaxgefühl und fördert die Regeneration.

- » **Heart & Bone Saver (Vitamin D3)**
- » **Muscle Coach (BCAA+Glutamin)**
- » **Cell Protector (OPC Traubenkernextrakt)**
- » **Power Gainer (L-ARGININ + MACA)**
- » **Bodyshaper (Grüner Kaffee, Guarana, Grüntee)**
- » **Muscle Energizer (Creatin)**

## FIGUR



StimaWELL® EMS bringt Ihren Körper auf die Überholspur. In kurzer Zeit erreichen Sie eine nachhaltige Figurformung. Sogar an schwer zugänglichen Partien wie der Taille haben wir Elektroden platziert.

- » **Cell Protector (OPC Traubenkernextrakt)**
- » **Functionality Supporter (Multivitamin)**
- » **Power Gainer (L-ARGININ + MACA)**
- » **Health Booster (Grüner Kaffee Extrakt)**
- » **Bodyshaper (Grüner Kaffee, Guarana, Grüntee)**

## CELLULITE



StimaWELL® EMS unterstützt Sie dabei in Form zu kommen oder in Form zu bleiben. Das Training sorgt für ein straffes Bindegewebe und bekämpft so Cellulite. Bei diesem Programm wird ein spezieller Strom erzeugt, der vermehrt die Produktion von Kollagen anregt und die Fettpölsterchen an Oberschenkel und Hüfte effektiv bekämpft.

- » **Heart & Bone Saver (Vitamin D3)**
- » **Health Guardian (Omega 3 Plus)**
- » **Strength Enhancer (Whey-Protein + Flohsamenschalen + Probiotikum)**
- » **Bodyshaper (Grüner Kaffee, Guarana, Grüntee)**
- » **Muscle Coach (BCAA+Glutamin)**

**StimaWELL® EMS**

Informieren Sie sich:  
[StimaWELL-EMS.de](http://StimaWELL-EMS.de)



**StimaWELL® FaceTime**

Informieren Sie sich:

[www.stimawell-ems.de/shop/beauty](http://www.stimawell-ems.de/shop/beauty)



**StimaWELL® EMS**

**StimaWELL® EMS**

Gehrstraße 4 // 35630 Ehringshausen, Germany // Tel. +49 6443 8333-0 // Fax +49 6443 8333-119  
info@stimawell-ems.de // [www.stimawell-ems.de](http://www.stimawell-ems.de)